

J551 の測定データを移動させる

2014/05/07

Ver 1.0

以前のデータを新しい PC やフォルダで使用するためには、現在使用しているフォルダに以前のデータをコピーする必要があります。その手順について説明します。

(windows XP の場合の手順です。)


目次

1. 隠しフォルダを表示させる
2. 移動させたいデータを探す
3. 移動先のフォルダを調べる
4. 設定を元に戻す

1. 隠しフォルダを表示させる


初期設定の場合、データを保存しているフォルダは表示されていません。

使用しているフォルダからデータを移動させたい場合は、フォルダを表示するように設定する必要があります。

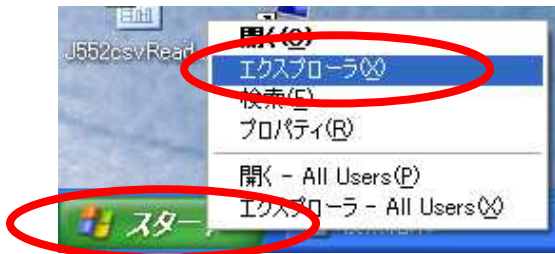


「スタート」ボタンで右クリックします。

「エクスプローラ」を選択します。

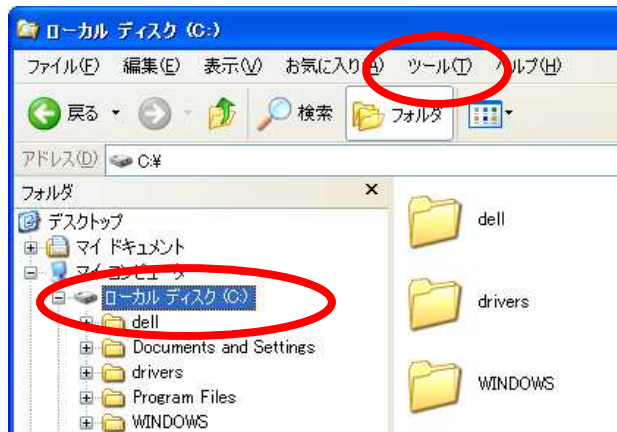

エクスプローラが開いたら、Cドライブをクリックします。

ツールバーの中から「ツール」→「フォルダオプション」と選択します。

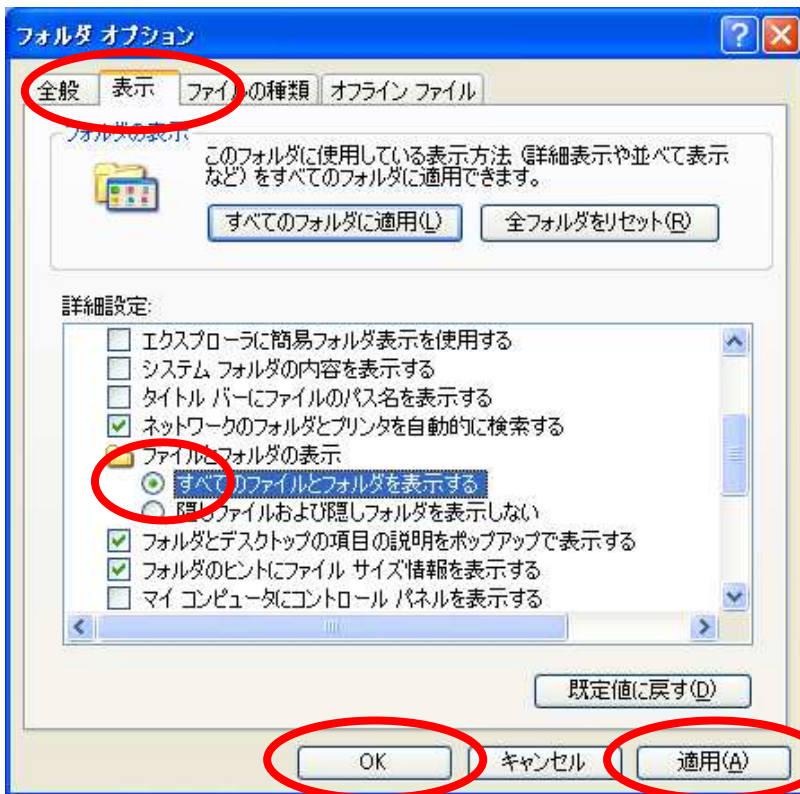


選択するとフォルダオプションのウィンドウが開きます。

「表示」タグを選択します。


「すべてのファイルとフォルダを表示する」を選択します。

右下の「適用」ボタンを押し、「OK」ボタンを押すと、隠れているフォルダが表示されるようになります。


2. 移動させたいデータを探す

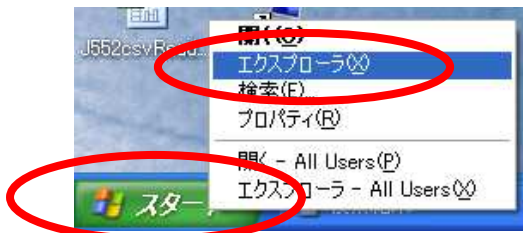


「スタート」ボタンで右クリックします。
「エクスプローラ」を選択します。

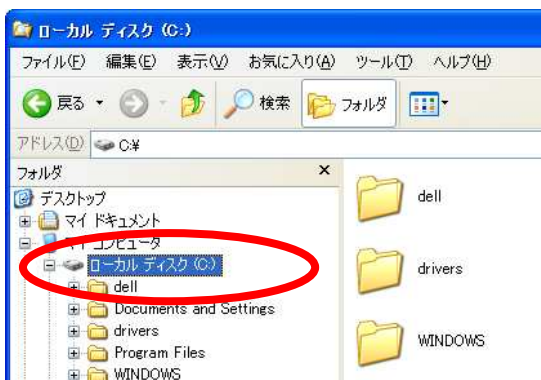

エクスプローラが開いたら、Cドライブをクリックします。

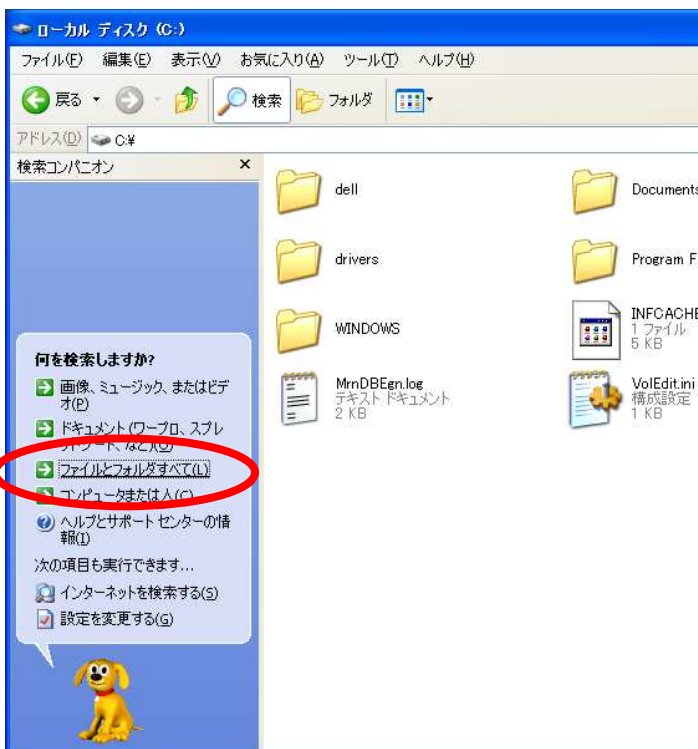


「Ctrl」キーを押しながら、「F」キーを押し、検索オプションを表示させます。
検索オプション内の「ファイルとフォルダすべて」を選択し検索欄を表示させます。
「ファイル名のすべてまたは一部」欄に hrdt*.csv と入力し、検索をクリックします。

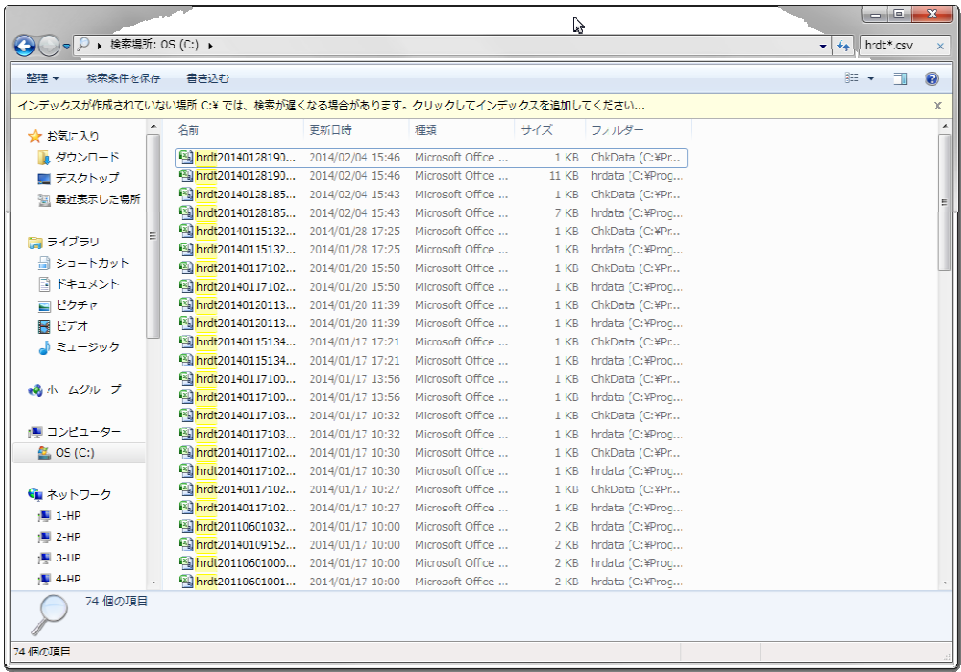


表示されたデータが測定データです。
移動させたいデータを選択しコピーして、コピー先のフォルダに貼り付ければ完了です。

3. 移動先のフォルダを調べる

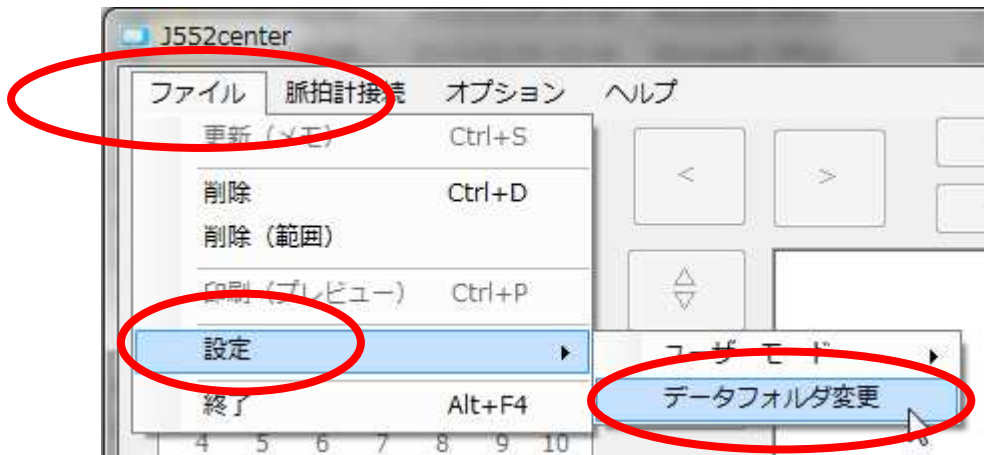

J551center のメニューバーから、「ファイル」→「設定」→「データフォルダ変更」と順番に選択します。

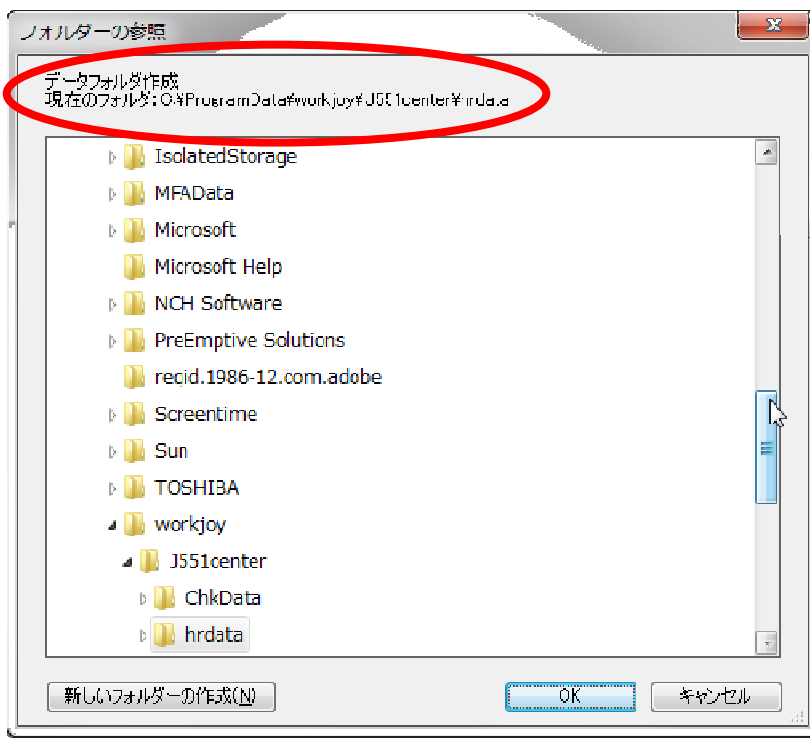

上図のようにフォルダの参照というウィンドウが表示されます。
現在のフォルダという項目が J551center で使用しているフォルダのパスになります。
上記のフォルダに以前のデータをコピーすることで、以前のデータを使用することができます。
J551center を再度立ち上げ、以前のデータを読むことができれば正常です。


4. 設定を元に戻す

現状のままですと、隠しファイルの設定が変更されているため元に戻す必要があります。




「スタート」ボタンで右クリックします。

「エクスプローラ」を選択します。

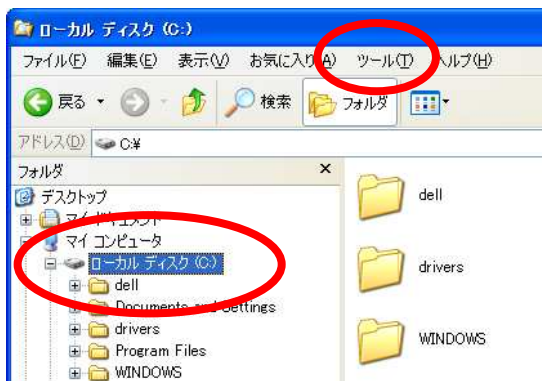

エクスプローラが開いたら、Cドライブをクリックします。

ツールバーの中から「ツール」→「フォルダオプション」と選択します。

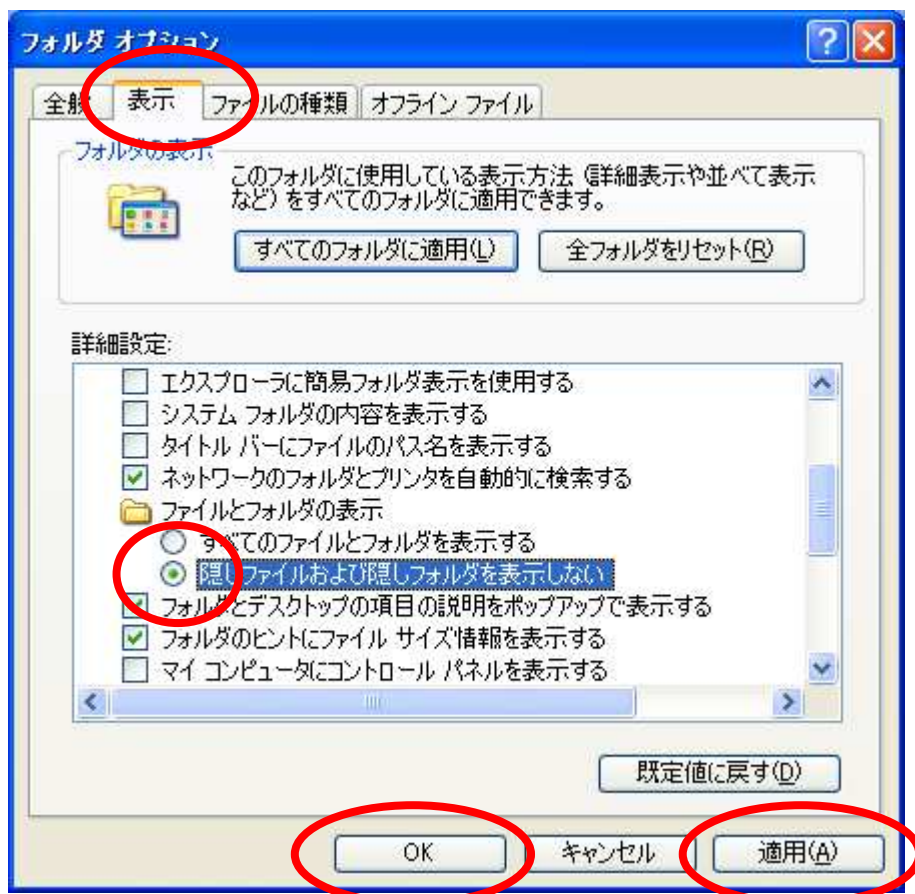

選択するとフォルダオプションのウィンドウが開きます。

「表示」タブを選択します。

「隠しファイルおよび隠しフォルダを表示しない」を選択します。

右下の「適用」ボタンを押し、「OK」ボタンを押すと、隠しフォルダが表示されなくなります。