

J551 の測定データを移動させる

2014/05/07

Ver 1.0

以前のデータを新しい PC やフォルダで使用するためには、現在使用しているフォルダに以前のデータをコピーする必要があります。その手順について説明します。

(windows7 の場合の手順です。)


目次

1. 隠しフォルダを表示させる
2. 移動させたいデータを探す
3. 移動先のフォルダを調べる
4. 設定を元に戻す

1. 隠しフォルダを表示させる


初期設定の場合、データを保存しているフォルダは表示されていません。

使用しているフォルダからデータを移動させたい場合は、フォルダを表示するように設定する必要があります。

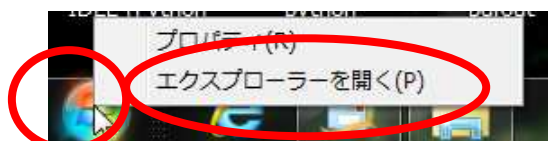


「スタート」ボタンで右クリックします。


「エクスプローラーを開く」を選択します。

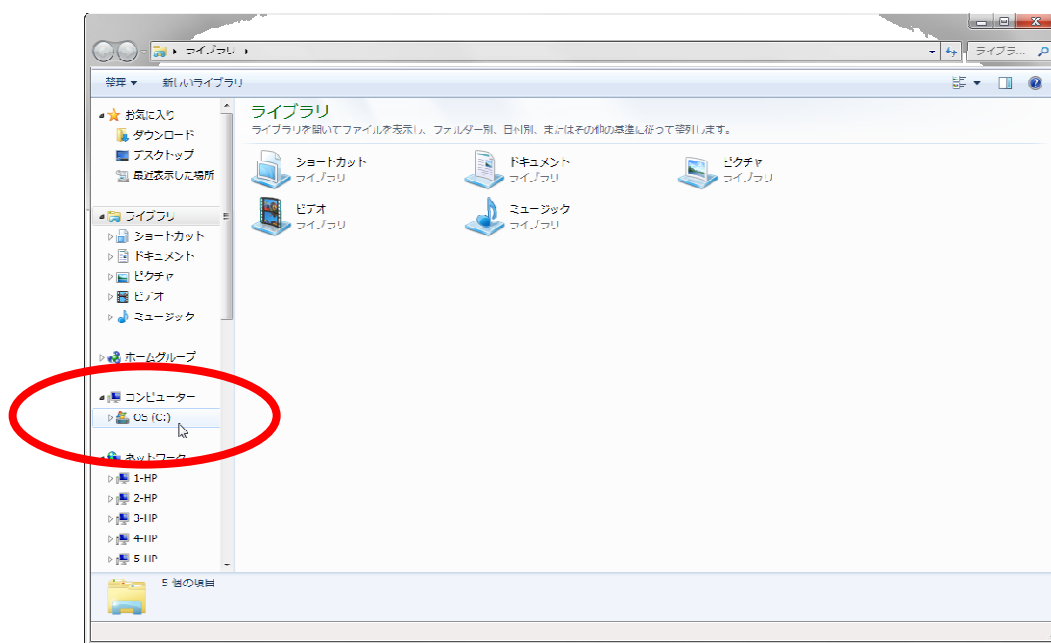

エクスプローラーが開いたら、Cドライブをクリックします。

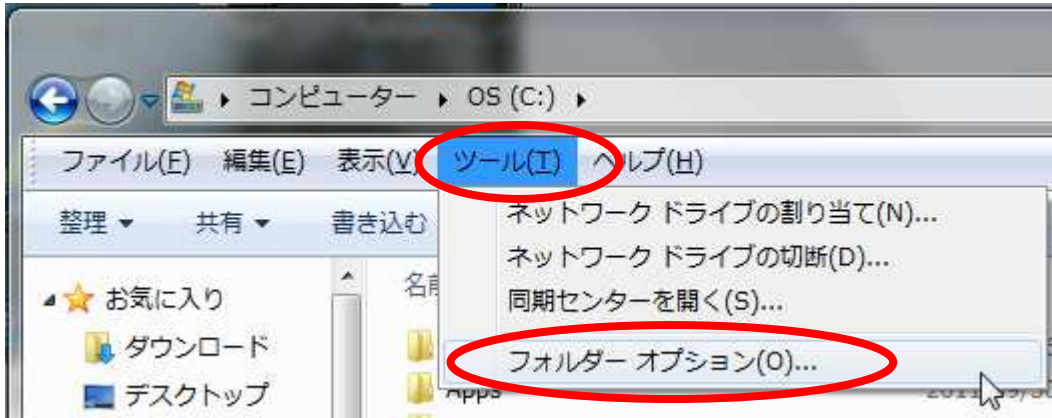


「Alt」キーを押すと、ツールバーが表示されます。
ツールバーの中から「ツール」→「フォルダオプション」と選択します。

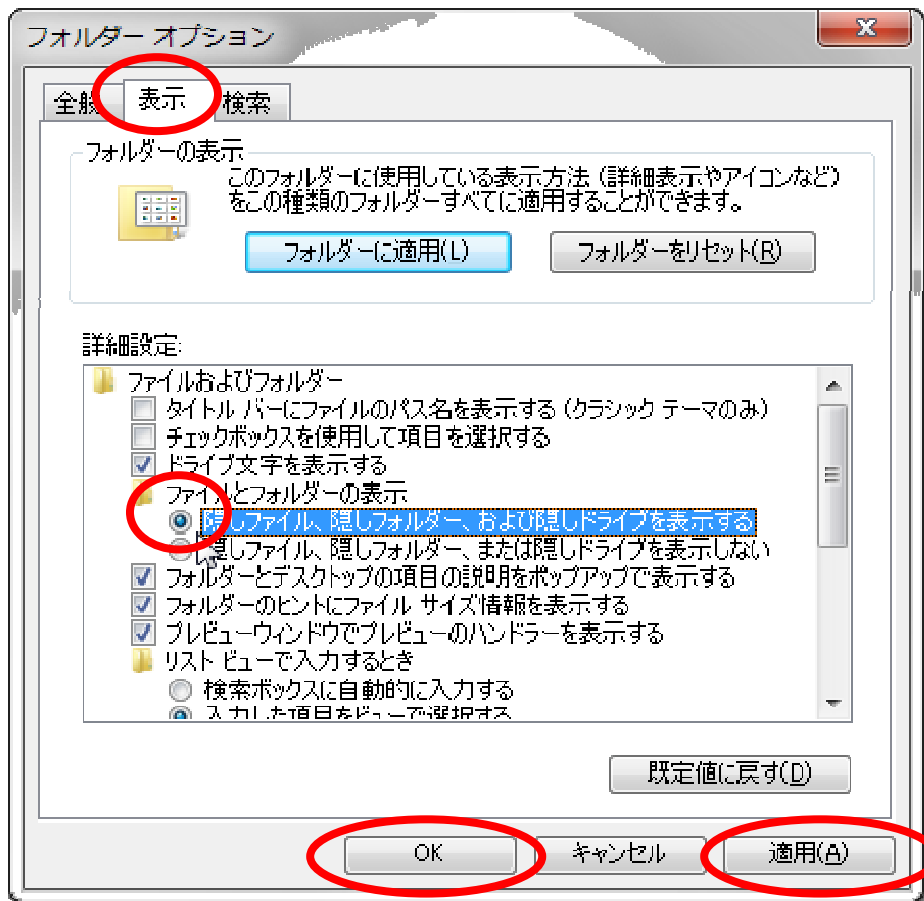


選択するとフォルダオプションのウィンドウが開きます。
「表示」タグを選択します。
「隠しファイル、隠しフォルダ、および隠しドライブを表示する」を選択します。
右下の「適用」ボタンを押し、「OK」ボタンを押すと、隠れているフォルダが表示されるようになります。


2. 移動させたいデータを探す

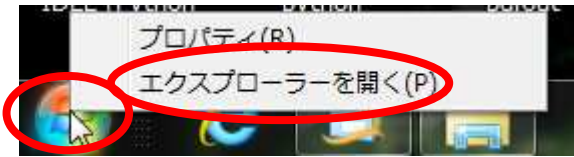


「スタート」ボタンで右クリックします。
「エクスプローラーを開く」を選択します。

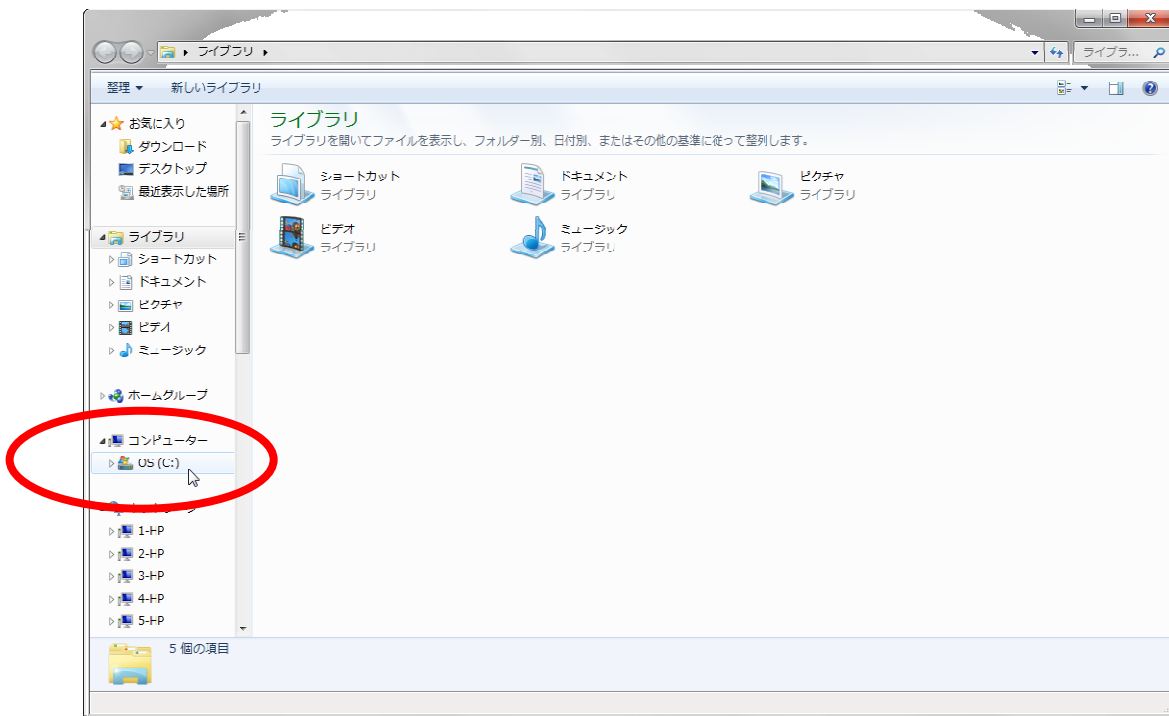

エクスプローラーが開いたら、Cドライブをクリックします。

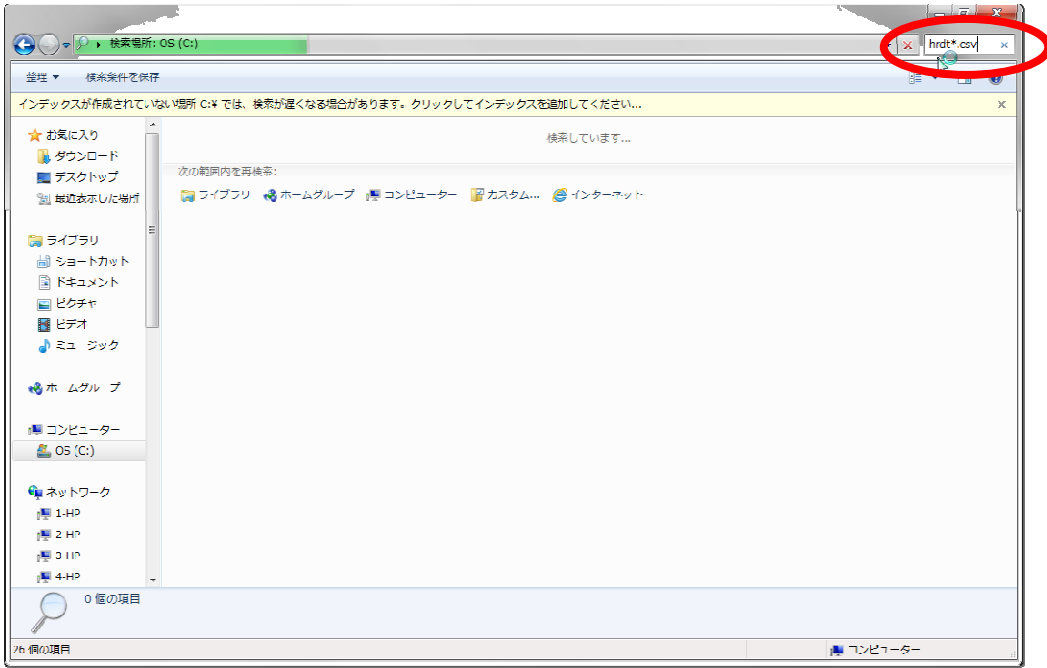


「Ctrl」キーを押しながら、「F」キーを押すし、検索窓を表示させます。
 検索窓に hrdt*.csv と入力する。入力すると自動で検索が開始されます。緑のバーが増加している間は
 検索中です。

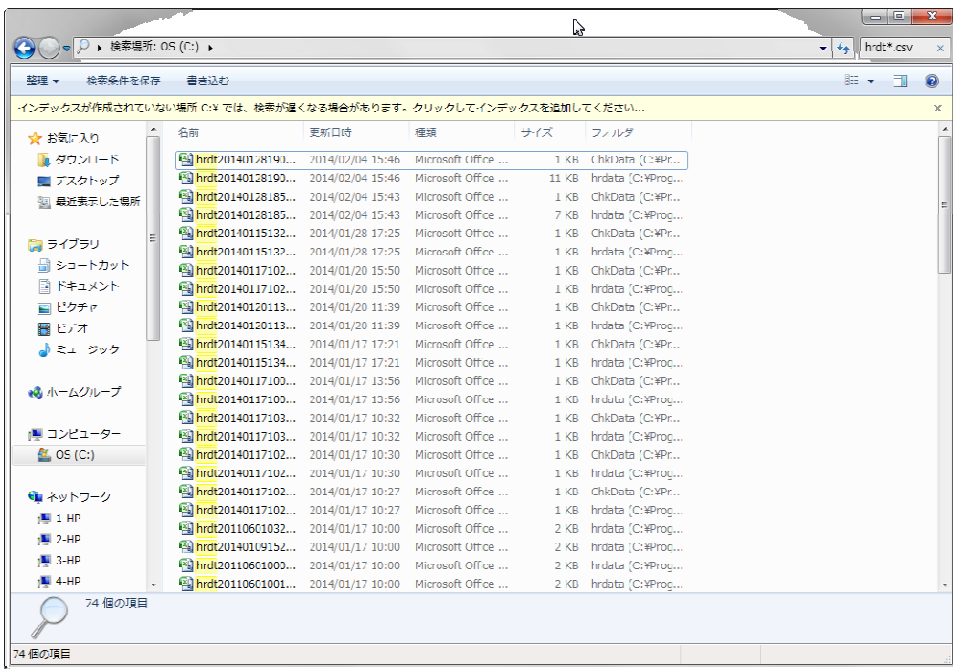


検索が完了すると、緑のバーが一杯になり消えます。
 表示されたデータが測定データです。
 移動させたいデータを選択しコピーして、コピーしたいフォルダに貼り付ければ完了です。

3. 移動先のフォルダを調べる

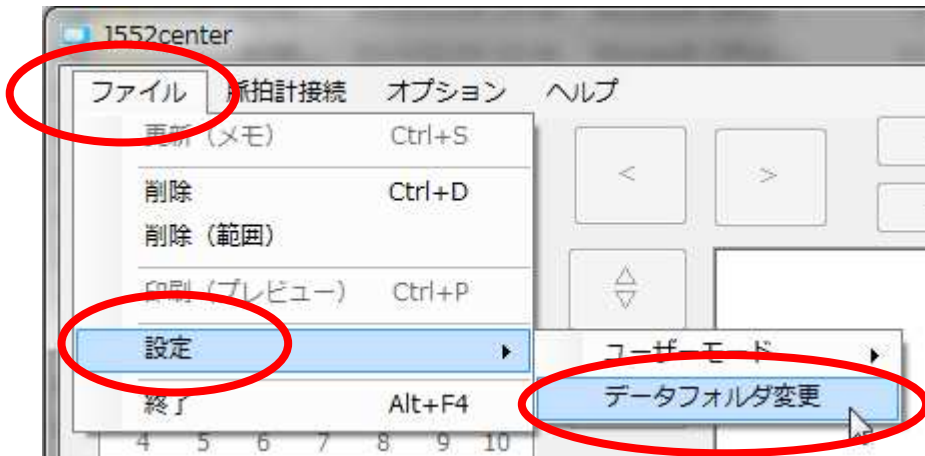


J551center のメニューバーから、「ファイル」→「設定」→「データフォルダ変更」と順番に選択します。

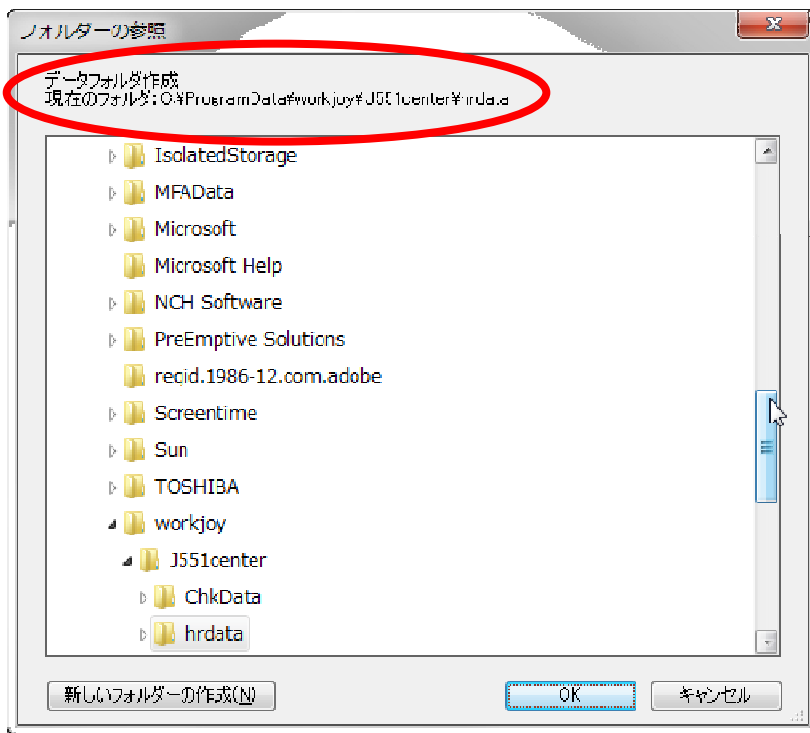

上図のようにフォルダの参照というウィンドウが表示されます。
現在のフォルダという項目が J551center で使用しているフォルダのパスになります。
上記のフォルダに以前のデータをコピーすることで、以前のデータを使用することができます。
J551center を再度立ち上げ、以前のデータを読むことができれば正常です。


4. 設定を元に戻す

現状のままですと、設定が変更されているため元に戻す必要があります。

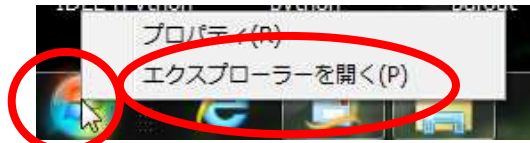


「スタート」ボタンで右クリックします。

「エクスプローラーを開く」を選択します。

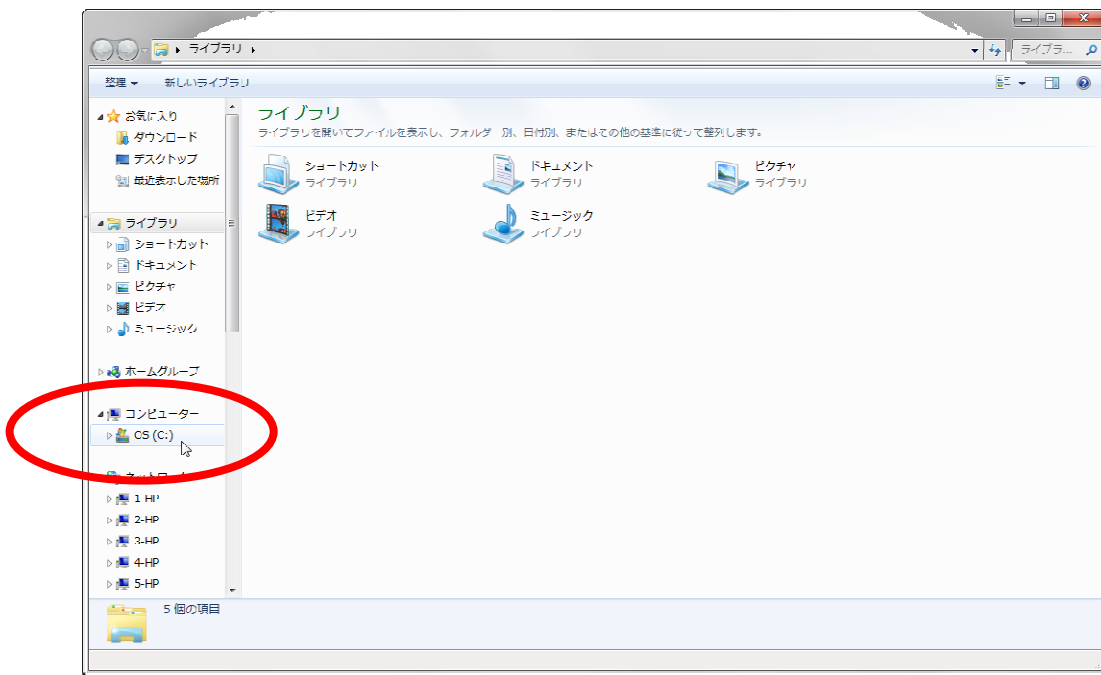


エクスプローラーが開いたら、Cドライブをクリックします。

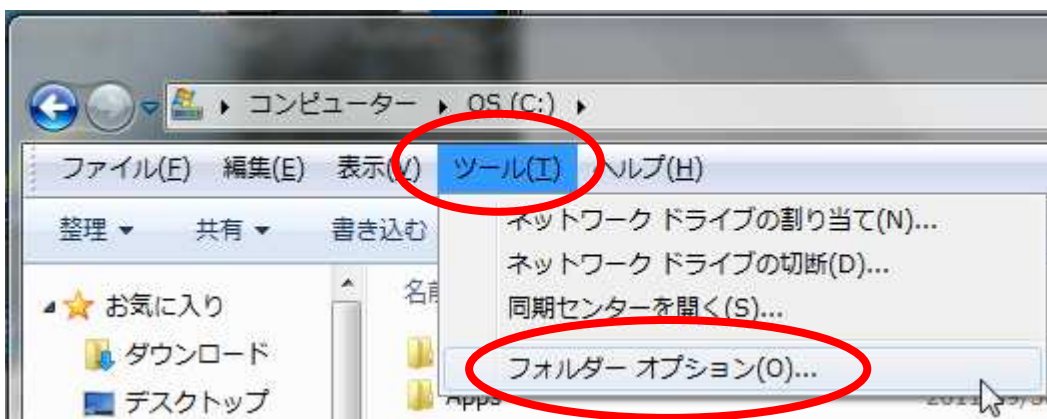

「Alt」キーを押すと、ツールバーが表示されます。

ツールバーの中から「ツール」→「フォルダオプション」と選択します。

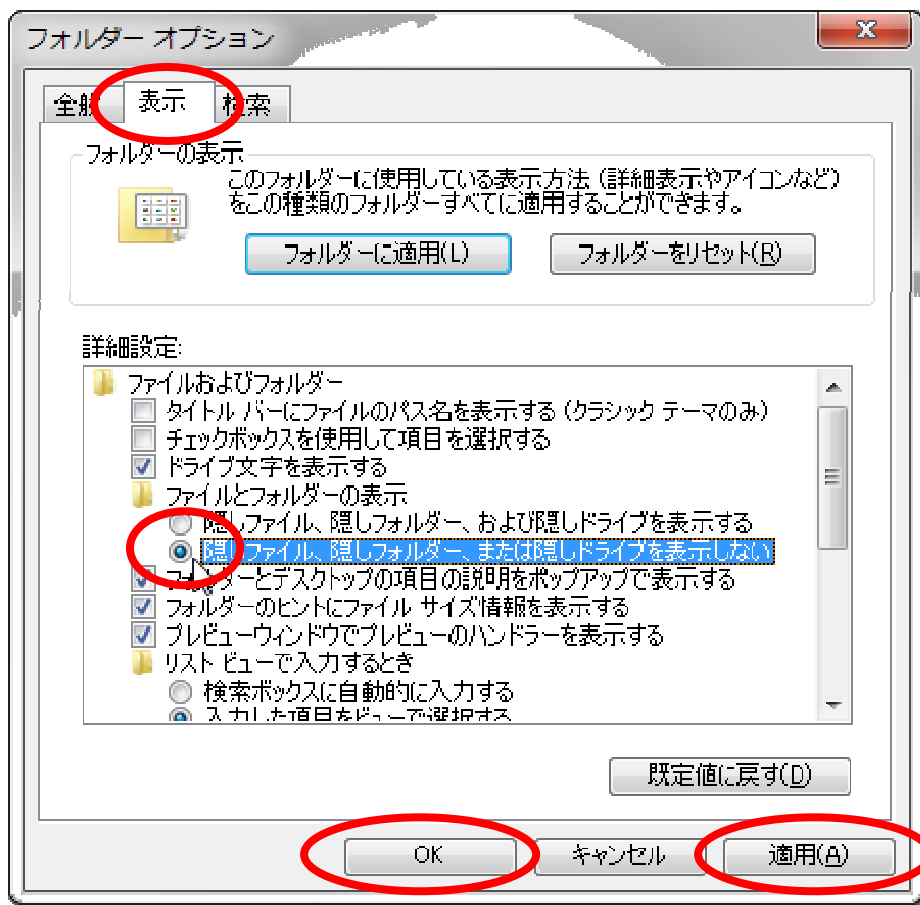

選択するとフォルダオプションのウィンドウが開きます。

「表示」タグを選択します。

「隠しファイル、隠しフォルダ、および隠しドライブを表示しない」を選択します。

右下の「適用」ボタンを押し、「OK」ボタンを押すと、隠しフォルダの表示がされなくなります。